


Termómetro de oído por infrarrojos

INSTRUCCIONES DE USO

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DEL USO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURA REFERENCIA.

Estimado cliente, ¡gracias por elegir nuestro producto!

Todos los termómetros de PIC Solution se fabrican utilizando la tecnología más avanzada y se someten a exigentes controles de calidad, de conformidad con la legislación europea, para garantizar la calidad y precisión. No utilizar este dispositivo para tomar decisiones críticas o para aplicaciones de seguridad. En caso de dudas o de una temperatura corporal elevada, consultar con un médico.

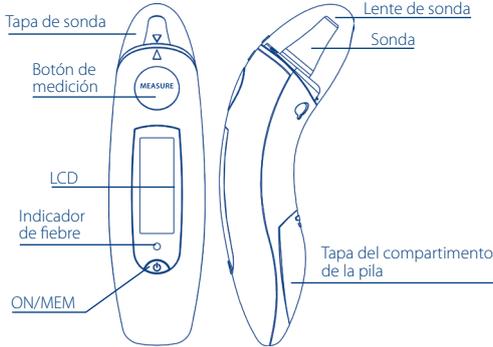

Uso previsto: El termómetro de oído por infrarrojos mide el calor infrarrojo que generan el tímpano y el tejido que lo rodea para reflejar la temperatura corporal del paciente
Perfil previsto del operador: Mínimo 11 años de edad (con 5 años de experiencia lectora intensiva); sin máximo de edad.

CÓMO MEDIR LA TEMPERATURA Encender el dispositivo y realizar lecturas

1. Pulsar el botón «ON/MEM» (véase la figura 1), el termómetro está listo para usarse cuando el icono  deja de parpadear y emite dos pitidos cortos.


2. Medir la temperatura del oído:

2.1 Mover la oreja hacia atrás ligeramente para enderezar el canal auditivo e insertar cuidadosamente la sonda en el canal. Apuntar hacia la membrana del tímpano para lograr la lectura más precisa posible (fig. 2).

• Para niños menores de dos años, tirar de la oreja suavemente hacia atrás.
• Para niños mayores de dos años y adultos, tirar de la oreja suavemente hacia arriba y hacia atrás.

2.2 Mantener presionado el botón de medición «MEASURE» hasta escuchar un pitido. Extraer la sonda del oído y leer la medición de la temperatura en la pantalla.

2.3 Para la siguiente medición: Después de escuchar dos breves pitidos, el icono deja de parpadear; entonces se puede realizar una nueva medición.

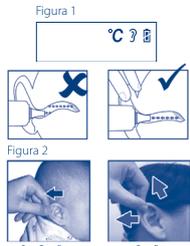

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

- El termómetro tiende a compensar las lecturas de la temperatura del oído según la temperatura ambiente. Para lograr una lectura lo más precisa posible, el termómetro debe permanecer en la misma habitación donde vaya a utilizarse a una temperatura ambiente estable al menos 15 minutos antes de su uso. La persona cuya temperatura vaya a medirse también debe permanecer en la habitación al menos 5 minutos antes de la lectura. Mientras se toma la temperatura, asegúrese de que el paciente y el termómetro no se expongan a ninguna fuente directa de calor, luz solar o aire acondicionado.
- Antes de la lectura, comprobar que el canal auditivo está limpio y es accesible; no limpiar el oído justo antes de utilizar la sonda, ya que el uso de agua caliente o fría puede influir en la lectura.
- No tomar la temperatura de una persona hasta que hayan pasado, al menos, treinta minutos tras realizar esfuerzo físico, un baño o una comida.
- Asegurarse siempre de que la sonda está limpia y no presenta daños.

⚠️ OBSERVACIONES:

1. Se recomienda realizar la medición tres veces con el mismo oído. Si las tres mediciones son distintas, seleccionar la temperatura más alta.
2. Antes de la medición, permanecer en un ambiente estable durante 5 minutos y evitar durante 30 minutos el ejercicio físico o tomar un baño.
3. Para evitar el riesgo de contaminación cruzada, limpiar la sonda tal y como se especifica en la sección «Cuidado y limpieza» después de cada uso.
4. La diferencia de temperatura entre personas sanas varía; entre diferentes partes del cuerpo puede ser de entre 0,2~1 °C
5. El «sesgo clínico» es de -0,5~ -0,7 °C.
6. Los «límites de concordancia» son de 1,02.
7. La «repetibilidad» es de 0,19 °C.

⚠️ **ATENCIÓN:** Para evitar el atragantamiento por la ingestión de partes pequeñas o pilas, mantener estos componentes fuera del alcance de niños o mascotas.

CÓMO CONECTAR EL TERMÓMETRO CON SU SMARTPHONE

1. Descargar la app gratuita PIC HEALTH STATION desde Google Play o la AppStore.
 2. Activar la app PIC HEALTH STATION en su smartphone. La versión Bluetooth® v. 4.0 se activará de forma automática.
 3. Asegurarse de que el termómetro esté encendido.
 4. Buscar el termómetro con PIC HEALTH STATION y conectarlo con su smartphone.
 5. Durante la conexión, solo el smartphone que se conectará al termómetro debe ejecutar la aplicación PIC HEALTH STATION. Si se presenta algún problema durante la conexión, asegúrese de que ningún otro smartphone esté ejecutando PIC HEALTH STATION, o reinicie el smartphone.
- Por favor, tenga en cuenta que el termómetro solo envía datos de temperatura cuando está conectado con su smartphone.
Cada lectura de la temperatura se transferirá a su dispositivo móvil de forma automática.

TRAS LA MEDICIÓN

1. Apagar: El dispositivo se apagará automáticamente si permanece inactivo más de 1 minuto para prolongar la duración de la pila.
2. Limpiar la sonda después de cada uso para asegurar una lectura precisa y evitar la contaminación cruzada. (Véase la sección de Cuidado y limpieza para más detalles).
3. Poner la tapa a la sonda cuando no se esté utilizando.

FUNCIONES

Indicación de fiebre

Si el termómetro detecta una temperatura corporal de $\geq 37,5$ °C (99,5 °F), se emitirá una señal de luz «Roja». Al mismo tiempo, se escucha un pitido largo seguido de tres pitidos cortos para advertir al usuario de fiebre potencial; si la temperatura es $< 37,5$ °C, se emite una señal de luz «Verde».

⚠️ **ATENCIÓN:** Luz roja: se recomienda monitorizar la temperatura corporal de forma constante. Si existen dudas sobre el estado de la persona, buscar asistencia médica.

MEMORIA

Hay un total de 25 conjuntos de memoria de temperatura corporal.
* Con el dispositivo encendido, presionar el botón «ON/MEM» para visualizar la temperatura almacenada con el icono .
Por favor, tenga en cuenta que los datos almacenados en la memoria del termómetro no se envían a la app.

SELECTOR °C/°F

En modo «apagado». Mantener presionado el botón de medición «MEASURE» y, a continuación, pulsar y soltar inmediatamente el botón «ON/MEM». Al cabo de 3 segundos, el icono «°C» cambiará a «°F». (Emplear el mismo procedimiento para volver a «°C»).

MODO SILENCIOSO

El indicador acústico del dispositivo está activado, pero puede desactivarse en el modo silencioso. Con el dispositivo encendido, mantener presionado durante 3 segundos el botón «ON/MEM». Soltar el botón «ON/MEM» una vez se encienda el icono en la pantalla LCD para activar el modo silencioso. Así no

se escucha ningún pitido. Se puede emplear el mismo procedimiento para desactivar el modo silencioso. **NOTA:** Si se sigue presionando el botón «ON/MEM» durante 5 segundos después de que se encienda el icono, el dispositivo se apaga SIN activar el modo silencioso.

Bluetooth®

Los datos de temperatura se sincronizan automáticamente con el dispositivo vía Bluetooth® v. 4.0

ESPECIFICACIONES

- De conformidad con los estándares ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56, IEC/EN60601-1-2(CEM), IEC/EN60601-1(Seguridad), ISO10993 y RoHS
- **Intervalo de medición de la temperatura:** 34~42,2 °C (93,2~108 °F)
- **Rango de funcionamiento:** 10~40 °C (50~104 °F), 15 %~85 % HR
- **Almacenamiento / Transporte ambiente:** Almacenamiento a una temperatura ambiente entre -20~+50 °C, HR \leq 85 %
800~1013 hPa
- **Presión atmosférica:** $\pm 0,2$ °C (0,4 °F) dentro de 35~42 °C (95~107,6 °F), $\pm 0,3$ °C (0,5 °F) para otros rangos.
- **Precisión:** Una pila de litio (CR2032 *1 ud.)
IP54
- **Clasificación de protección:** Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua.
- **Clase IP54:** 143,16 x 39,91 x 55,86 mm
- **Dimensiones:** 75,7 gramos, pila incluida
- **Peso:** Aproximadamente 2000 lecturas sucesivas.
- **Duración de la pila:** 4 años
- **Vida útil prevista:** nRF51822
- **Módulo BT:** 2,402 - 2,480 GHz
- **Frecuencia:** ≤ 4 dBm
- **Rango de potencia de salida:** Bluetooth® & indicación de fiebre y memoria & función de selección °C/°F.
- Este termómetro convierte la temperatura del oído para mostrar su «equivalente oral» (según el resultado de la evaluación clínica para obtener el valor de desviación).

⚠️ ADVERTENCIA:

- El dispositivo no debe sumergirse en ningún líquido ni exponerse a humedad directa.
- No hay limitación de edad o género para utilizar el termómetro por infrarrojos.
- Este no es un producto AP/APG, y por tanto no es adecuado para su uso en presencia de óxido nítrico, oxígeno, aire o mezclas de gases anestésicos inflamables o explosivos.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- ⚠️ **ADVERTENCIA:** La sonda es la parte más delicada del termómetro. Tenga cuidado al limpiar la lente para evitar daños.
1. Tras la medición, utilizar un bastoncillo con alcohol (70 % de concentración) para limpiar la lente (en el interior de la sonda).
 2. Dejar secar la sonda por completo durante al menos 1 minuto.
 3. Rango de temperatura de almacenamiento: Debe almacenarse a una temperatura ambiente entre -20~+50 °C. HR \leq 85 %
 4. Mantener el dispositivo seco, lejos de cualquier líquido y de la exposición directa a la luz solar.
 5. La sonda no debe sumergirse en ningún líquido.
- *Nota: Comprobar si el dispositivo presenta daños en caso de caída. En caso de duda, enviar el dispositivo completo a la tienda especializada más cercana para su recalibrado.



⚠️ **ADVERTENCIA:** Sostener durante mucho tiempo el termómetro puede causar un aumento de la temperatura ambiente en la lectura de la sonda. Esto puede provocar que la medición de la temperatura corporal sea más baja de lo habitual.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Sustitución de la pila 
- El dispositivo dispone de una pila de litio (CR2032x1).



1. Extraer la junta de goma de la cubierta de la pila con un destornillador pequeño y puntiagudo en forma de X.
2. Aflojar el tornillo de la cubierta de la pila.
3. Utilizar el pulgar para expulsar la cubierta de la pila.
4. Sostener el dispositivo y utilizar el destornillador para sacar la pila.
5. Colocar la nueva pila bajo el gancho metálico del lado izquierdo y presionar hacia abajo el lado derecho de la pila hasta escuchar un «click».
6. Volver a colocar la cubierta de la pila, fijar el tornillo y taponar el agujero del tornillo con la junta de goma.

⚠️ **ADVERTENCIA:** El lado positivo (+) hacia arriba y el lado negativo (-) hacia abajo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mensaje de error	Problema	Solución
	Error 5~9, el sistema no está funcionando correctamente.	Extraer la pila, esperar 1 minuto y volver a colocarla. Si el mensaje vuelve a aparecer, contactar con la tienda especializada para obtener ayuda.
	Medición antes de la estabilización del dispositivo.	Esperar a que todos los iconos dejen de parpadear.
	La temperatura ambiente no está en el rango entre 10 °C y 40 °C (50 °F ~ 104 °F).	Dejar que el termómetro permanezca en una habitación al menos 15 minutos a temperatura ambiente: 10 °C y 40 °C (50 °F ~ 104 °F).
	La temperatura tomada es mayor de +42,2 °C (108 °F)	Permanecer 5 minutos a temperatura ambiente y evitar realizar ejercicio físico o tomar un baño durante 30 minutos; a continuación, comprobar que la lente de la sonda está limpia antes de volver a tomar la temperatura. Si sigue sin funcionar correctamente, contactar con la tienda especializada más cercana.
	La temperatura tomada es inferior a +34 °C (93,2 °F)	
	El dispositivo no se enciende en la fase de preparación.	Cambiar la pila.

LEYENDA DE SÍMBOLOS

	Se cumple el marcado CE, los números de registro de los organismos notificados y el requisito del Anexo II de la Directiva relativa a los dispositivos sanitarios 93/42/CEE.		Indica que este dispositivo está sujeto a la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 2012/19/UE en la Unión Europea. Para proteger el medio ambiente, desechar el dispositivo en centros de recogida de residuos adecuados según las regulaciones locales y nacionales.
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Cuidado
	Fabricante		Parte aplicada de tipo BF
	Reciclaje de baterías		Reciclaje de papel
	Protección completa contra contacto, protección contra sedimentaciones de polvos en el interior y protección contra agua pulverizada.		Marca combinada Bluetooth®, Bluetooth® versión v. 4.0
	Seguir las instrucciones de uso		Código de referencia en el catálogo del producto o número de catálogo
	Instrucciones de uso		Stand-by
	Número de lote		Conformidad con la Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas		
El termómetro está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario debe asegurarse de usar el termómetro en un entorno de este tipo.		
Prueba de emisiones	Conformidad	Entorno electromagnético - guía
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El termómetro usa energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es improbable que provoquen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	El termómetro es apto para su uso en todos los ámbitos, entre los que se incluyen los domésticos y aquellos directamente conectados a la red de suministro público de energía de baja tensión que suministra energía a los edificios con fines domésticos.
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	No aplicable	
Variaciones de tensión/emisiones intermitentes IEC 61000-3-3	No aplicable	

Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética			
El termómetro está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario debe asegurarse de usar el termómetro en un entorno de este tipo.			
Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms entre 150 kHz y 80 MHz	No aplicable	Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por radiofrecuencia no deben utilizarse a una distancia menor de la recomendada de ninguna parte del termómetro, incluyendo los cables, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P} \text{ 80 MHz a 800 MHz}$ $d = 2,3 \sqrt{P} \text{ 800 MHz a 2,5 GHz}$ donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Para las intensidades de campo de transmisores de radiofrecuencia fijos, según se determine en la prueba electromagnética in situ, a debe estar por debajo del nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencias b. Se pueden producir interferencias cerca de equipos que lleven el siguiente símbolo: 
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m entre 80 MHz y 2,5 GHz	3 V/m	
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica el rango de frecuencias más alto. NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las circunstancias. La absorción y el reflejo debidos a estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.			

^{a)} Las intensidades de campo generadas por los transmisores fijos, tales como estaciones base para telefonía de radio (teléfonos móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, emisoras de aficionados, emisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por transmisores de radiofrecuencia fijos, se debe considerar la posibilidad de realizar una prueba electromagnética in situ. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se utilizará el NOME PRODOTTO excede el nivel de cumplimiento de RF pertinente indicado anteriormente, el dispositivo deberá observarse para verificar que su funcionamiento sea normal. Si se detectan anomalías en el funcionamiento, podría ser necesario adoptar medidas adicionales, como la reorientación o la reubicación del termómetro.
^{b)} En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser de menos de 3 V/m.

Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética			
El termómetro está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario debe asegurarse de usar el termómetro en un entorno de este tipo.			
Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
Descargas electrostáticas (ESD) IEC 61000-4-2	6 kV contacto 8 kV aire	6 kV contacto 8 kV aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están revestidos de material sintético, la humedad relativa debe ser por lo menos del 30 %.
Transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas IEC 61000-4-4	2 kV para líneas de suministro eléctrico 1 kV para líneas de entrada/salida	No aplicable	La calidad de la red de suministro debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Subida de tensión IEC 61000-4-5	1 kV de línea(s) a línea(s) 2 kV de línea(s) a tierra	No aplicable	La calidad de la red de suministro debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Interrupciones y variaciones de tensión en las líneas de entrada del suministro de energía. IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % caída en UT) durante 0,5 ciclos 40 % UT (60 % caída en UT) durante 5 ciclos 70 % UT (30 % caída en UT) durante 25 ciclos <5 % UT (>95 % caída en UT) durante 5 seg.	No aplicable	La calidad de la red de suministro debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario del termómetro necesita un funcionamiento continuo del dispositivo mientras se producen interrupciones de alimentación, se recomienda alimentar el termómetro con un sistema de alimentación ininterrumpida o una batería.
Frecuencia eléctrica (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia de alimentación deben tener los niveles propios de un local típico de un entorno comercial u hospitalario.
NOTA: UT es la tensión de red de AC antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Distancias de separación recomendadas entre el EQUIPO EM y el SISTEMA EM y los equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles y móviles.			
El termómetro está destinado para uso en entorno electromagnético en el que estén controladas las perturbaciones de radiofrecuencia radiadas. El cliente o el usuario del termómetro puede contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas guardando una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia (transmisores) y el termómetro, tal y como se recomienda a continuación, según la potencia máxima de salida del equipo de comunicación.			
Potencia nominal de salida máxima del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor M		
	entre 150 kHz y 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	entre 80 MHz y 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	entre 800 MHz y 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	N/A	0,12	0,23
0,1	N/A	0,38	0,73
1	N/A	1,2	2,3
10	N/A	3,8	7,3
100	N/A	12	23
Para transmisores con potencia nominal máxima de salida que no figure en la tabla anterior, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede determinar por medio de la ecuación que se aplica a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor. NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplicará la distancia de separación correspondiente al rango de frecuencia superior. NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las circunstancias. La absorción y el reflejo debidos a estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.			

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE:
Por la presente, RADIANT INNOVATION INC declara que el tipo de equipo radioeléctrico REF. 02009196100000 es conforme con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 93/42/CEE y la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.radiantek.com.tw/download/certifications.asp>

 **Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE.**
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto deberá separarse de los desechos domésticos para su eliminación al final de su vida útil y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o devolverse al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. Realizar una recogida selectiva adecuada para que el aparato pueda ser reciclado, tratado y eliminado de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el mismo y sobre la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

 **CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/66 CE**
El símbolo del contenedor de basura tachado en las pilas o en el paquete del producto indica que, al final de su vida útil, estas no deben desecharse como un residuo urbano. Deben echarse separadamente de los residuos domésticos, bien depositándolas en un depósito de recogida selectiva concreto para pilas o devolviéndose al vendedor a la hora de comprar pilas similares, recargables o no. Los símbolos químicos Hg, Cd y Pb que aparecen bajo el contenedor de basura tachado indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario es el responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La correcta eliminación del producto contribuye a minimizar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto. La inadecuada eliminación del producto por parte del usuario ocasiona daños al medio ambiente y a la salud humana. Para obtener información más detallada en relación con los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos o a la tienda donde compró el aparato.

NOTA:
• La marca Bluetooth® y su respectivo logotipo son marcas registradas de SIG. Inc., por lo que todo uso de los mismos por parte de PIKDARE se realiza bajo licencia.
• La marca Google Play y su respectivo logotipo son marcas registradas de Google Inc.
• La marca Apple y su respectivo logotipo son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es un servicio con marca comercial de Apple Inc. registrada en los Estados Unidos y en otros países.

 **ADVERTENCIA:**
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales.
Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad, remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

En caso de problemas relacionados con la configuración, el mantenimiento o el uso del aparato, contactar con el distribuidor local o llamar al número 800 900 080 (gratuito en Italia).

 **ADVERTENCIA:** ¡No realice operaciones de mantenimiento o reparación en el aparato durante su uso! Las operaciones de mantenimiento o reparación debe llevarlas a cabo exclusivamente un Centro de asistencia PIC.

Fecha de fabricación: se muestra en el número de serie (abrir la cubierta de la pila, se muestra en el interior del dispositivo)
LOTE: 10AAMMXXXX, fecha de producción del dispositivo: el segundo par de cifras del número de lote indica el año, y el tercer par, el mes. (LOTE 1016100001; 16=2016; 10 = octubre).

Nota: El termómetro se calibra en el momento de la fabricación. En caso de dudas sobre la precisión de la medición de la temperatura, contactar con su distribuidor local o llamar al número 800 900 080 (gratuito en Italia).

 **ADVERTENCIA:** No se permite realizar modificaciones en este equipo

 Lea estas instrucciones detenidamente antes de su uso y consérvelas para futura referencia

 Parte aplicada de tipo BF

GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales.
Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad, remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.
En caso de problemas relacionados con la configuración, el mantenimiento o el uso del aparato, contactar con el distribuidor local o llamar al número 800 900 080 (gratuito en Italia). ¡Advertencia! No realizar tareas de mantenimiento ni reparación del dispositivo.

  Medical Technology Promedt Consulting GmbH
Dir.: Altenhofstrasse 80, D-66386 St. Ingbert, Alemania

 Radiant Innovation Inc. <http://www.radiantek.com.tw>
Dir.: 1F, No.3, Industrial East 9th Road, Science-Based Industrial Park, HsinChu, Taiwan 300.

Distribuidor:
PIKDARE S.r.l.
Via Saldarini Catelli 10,
22070 - Casnate con Bernate (CO) - Italia

 
0120
(93/42/CEE)
0214
(2014/53/UE)

Made in China - Fabricado en China
Fabricado en China - Παράγεται στην Κίνα

Rev.01/2017
76 009196 100000
[REF] 02009196100000